

Nachträgliche Bearbeitung übertragener Daten des Pen Sensors

Es besteht die Möglichkeit, die im Pen Sensor Memory gespeicherten Messwerte (max. 10) an den MWD zu übertragen. (siehe Seite 31 der Bedienungsanleitung)

Alle Optionen, die eine Nachbearbeitung erfordern oder ermöglichen, werden nach folgendem Ablauf ausgeführt:



- Wählen sie aus dem Hauptmenu ‚Erinnerungen‘
- Anschließend wählen Sie ‚Verpasste Erinnerungen‘.
- Anschließend wählen Sie Alle/Heute.



Es erscheint folgende Maske:



Zur Ergänzung diesen Messwert mit Broteinheiten, Insulineingabe und Bemerkung drücken Sie die  Taste.

Der Ablauf ist jetzt wie gehabt (siehe Seite Seite 31 der Bedienungsanleitung).

Für die nächste Ergänzung drücken Sie wieder die  Taste.